

商品の点検について

★汚れていませんか？

ホコリや泥などで汚れたときはそのままにしておらず、早めに濡れ雑巾等でふき取ってください。汚れのひどいときは中性洗剤をお使いください。

★四点設置していますか？

支柱・滑り止めキャップが接地しているかご確認ください。四点接地していない場合、フレームの歪みやネジの緩みが考えられます。

★洗浄の際には、水、お湯、または中性洗剤をご使用ください。

洗浄後は乾燥させてください。カビや腐食の原因となります。

仕様

外寸：W465×D300×H125～180
重さ：1.5kg
材質：アルミニウム

保証について

弊社の定める保証とは、正常な使用状態において、故障が生じた場合に限り、無償にて修理を行なうことをお約束するものです。

★保証期間

お買い上げ日より1年間（消耗品の滑り止めキャップは含みません）

★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造うち切り後、3年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

★修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

★本製品を他人に譲る場合

この製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

★一度使用したものは、原則として製品の御取り替えはできません。

異常が見つかったら直ちにご使用を中止して、販売店へご相談ください。

記載の重量や寸法は設計値であり、実物とは多少誤差がある場合があります。

踏台面積：W285×D270

最大使用質量：150kg

★保証期間後

お買い上げの販売店にてご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

★保証の適用除外となる場合

ご使用による消耗品および取扱不注意による破損
地震、台風、水害などの天災、及び事故、火災による消失・破損

お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
保全上の不備及び弊社の特約販売店以外で行った修理や改造等による破損

弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
製品の本来の使用目的にそぐわない使用による故障破損
取扱説明書に従わずして生じた故障破損

取扱説明書に禁じられている使用方法によって生じた故障
日本国外でご使用の場合

アルミの匠が考案したらくらく踏み台




ケアステップ 取扱説明書

保管用

よくお読みください

保証書

この度は、介護用品ケアステップをご購入いただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は安全にご使用いただくために、ご利用になる前にはこの説明書を必ずお読みください。使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。

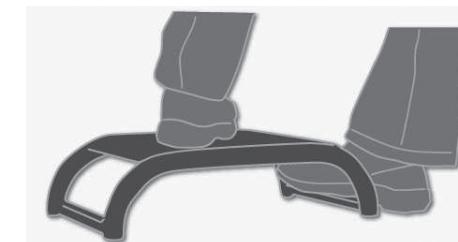

※必ず介助者が足で固定して使用して下さい。

取扱説明書は適宜更新しております。最新版を弊社ホームページからダウンロードしていただけます。

<http://www.kyouei-alumi.net>

有限会社 協栄金属
0725-32-8666

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の為、一部予告なく変更することがあります。

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。

この製品は溝、段差、傾斜がある場合では使用しないでください。

踏み台を火気に近づけないで下さい。

Kyouei 有限会社 協栄金属

〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-6-38
TEL 0725-32-8666 / FAX 0725-32-8667

※平成28年8月現在